


07.05. 2013

Инструкция по применению изделия „Мочеприемник одноразовый ножной Vogt Medical“

Мочеприемники предназначены для сбора мочи, для одноразового применения. При транспортировке избегайте высокого давления, попадания прямых солнечных лучей, снега и дождя. Храните в прохладном, сухом и чистом месте при относительной влажности не более 80%, избегать загрязненного воздуха.

Срок хранения 5 лет

- Извлеките мочеприемник из упаковки. Предварительно проверьте целостность упаковки и срок годности. Не использовать при механическом, химическом, физическом или биологическом повреждении изделия.
- Проверьте, закрыт ли клапан на дне мочеприёмника. Если нет, то закройте.
- Разместите мочеприемник в удобном и надежном положении для пациента.
- Зафиксируйте мочеприемник в вертикальном положении на передней поверхности бедра, используя специальные крепления.
- Снимите защитный колпачок с дренажной трубки и соедините мочевой катетер или уропрезерватив с коннектором приводящей трубки мочеприемника.

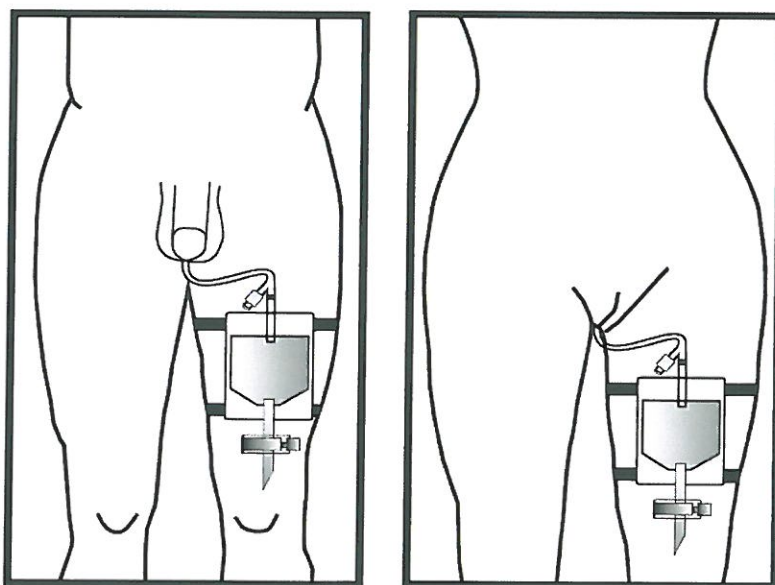

- Используйте шкалу на передней поверхности мешка для считывания показаний заполнения мочеприемника мочой.



Vogt Medical Vertrieb GmbH . Rüppurrer Str. 1 A, Haus B . 76137 Karlsruhe . Germany

- Когда объем жидкости в мочеприемнике достигнет максимального уровня шкалы на передней стороне мочеприёмника, или по мере необходимости, откройте клапан на дне, чтобы слить содержимое, после чего закройте клапан.
- Производите своевременную замену мочеприемника (не рекомендуется использовать более 2 суток).
- Использованный мочеприемник утилизируйте в соответствии с больничными требованиями.

Предупреждение: не используйте этот мочеприемник для сбора анализа мочи в течении 24 часов.

Александр Руф
Ответственный за безопасность



Geschäftsführer: Michael Vogt
Steuernummer: 35009/ 03261
Umsatzsteuer-ID: DE195419392
Handelsregisternummer: HRB-108246
Amtsgericht Mannheim

Telefon: +49 (0)721 98235-0
Telefax: +49 (0)721 98235-20
E-Mail: vm@vogt-medical.com
Internet: www.vogt-medical.com

Commerzbank
Konto: 609 469 700
BLZ: 660 800 52
SWIFT-BIC: DRES DE FF 660
IBAN: DE92 6608 0052 0609 4697 00

BW-Bank
USD-Konto: 7482 1022 82
BLZ: 600 501 01
SWIFT-BIC: SOLA DE ST
IBAN: DE62 6005 0101 7482 1022 82

BW-Bank
EUR-Konto: 41 50 451
BLZ: 600 501 01
SWIFT-BIC: SOLA DE ST
IBAN: DE40 6005 0101 0004 1504 51