


АМС-МЕД

НАБОР ДЛЯ ВВЕДЕНИЯ ЭНТЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ ГРАВИТАЦИОННЫЙ БЕЗ МЕШКА ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Рисунок 1. Компоненты

- 1 – Защитный колпачок;
- 2 – Устройство для прокалывания;
- 3 – Зажим;
- 4 – Дополнительный коннектор;
- 5 – Камера визуального контроля;
- 6 – Бумажная карточка;
- 7 – Трубка;
- 8 – Коннектор;
- 9 – Колпачок;
- 10 – Универсальная крышка.

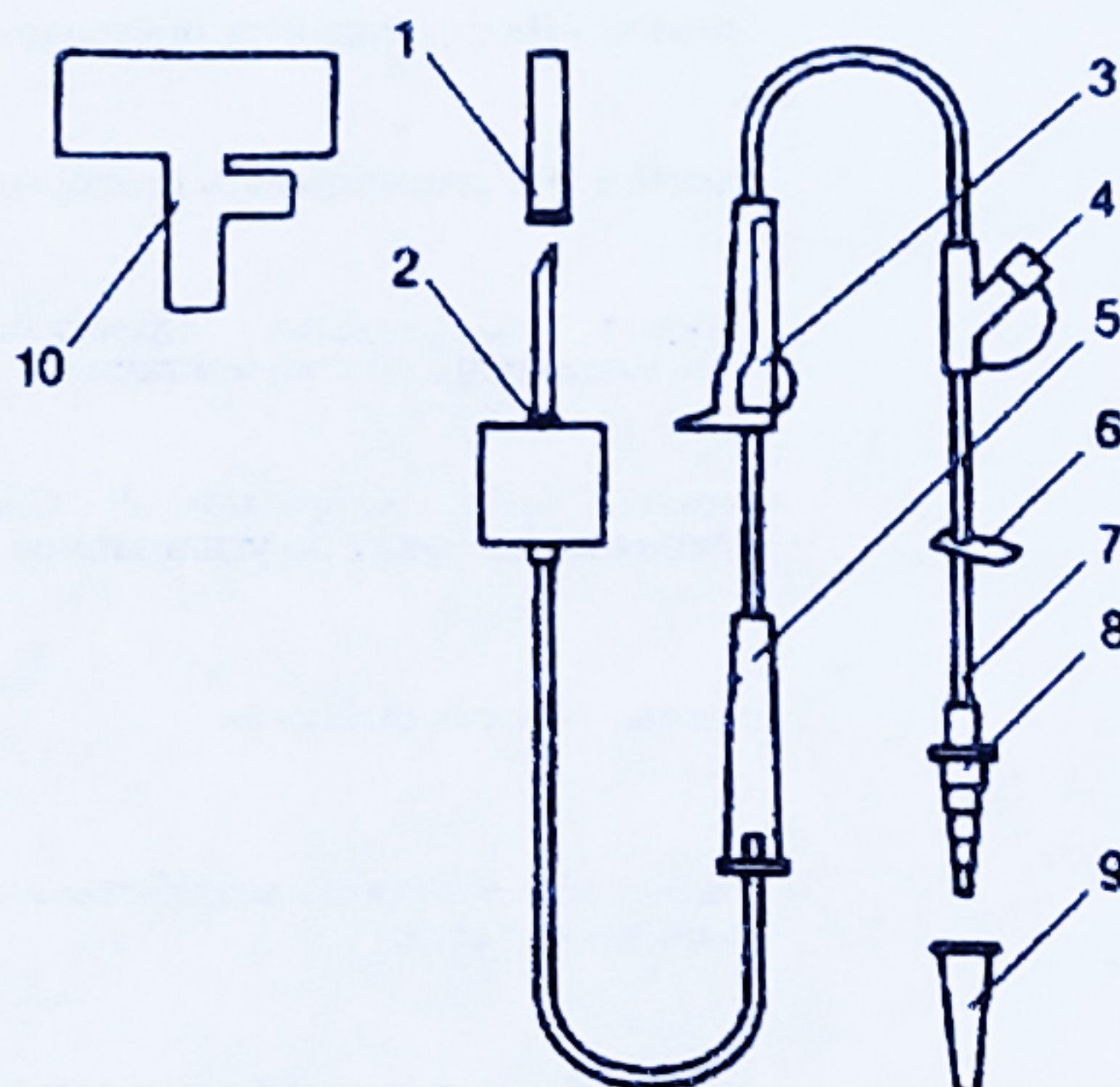

Порядок работы с изделием

Аккуратно изъять изделие из упаковки. После извлечения изделия из упаковки внимательно осмотрите его на предмет наличия изломов, изгибов или разрывов. Не следует использовать изделие, если выявлены повреждения, препятствующие надлежащему функционированию изделия или оказывающие негативный эффект на пациентов.

Проконтролировать соответствие маркировки изделия данным этикетки.

Способ применения

1. Закройте зажим на устройстве.
2. Возьмите пакет с питательной смесью, так что бы горловина пакета была в верхнем положении. Подсоедините изделие к пакету с питательной смесью, открутив крышку и проколите мембрану устройством для прокалывания. Зафиксируйте устройство на резьбе до упора. При использовании емкости с питательной смесью (бутылка с крышкой) используйте устройство с универсальной крышкой.
3. Медленно откройте зажим и наполните трубку жидкостью (избегайте того, чтобы камера для визуального контроля была наполнена полностью).
4. Закройте зажим.
5. Подсоедините коннектор к питательному зонду, медленно откройте зажим, чтобы установить желаемую норму подачи питательной смеси (1 мл=20 капель приблизительно).
6. Начните введение энтерального питания со скоростью 30 мл/час, далее отрегулируйте подачу до желаемой нормы.
7. После окончания введения питательной смеси: Закройте зажим и отсоедините изделие от питательного зонда. Утилизировать изделие в соответствии с разделом «Порядок утилизации».

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.

Не использовать изделие при поврежденной упаковке.

Повторное использование данного изделия, предназначенного для однократного применения, может представлять риск для пользователя. Повторная обработка, очистка, дезинфекция могут ухудшить технические характеристики изделия, что в свою очередь создает риск нанесения телесных повреждений или инфицирования пациента.

Следите за сроком годности изделия. Не используйте набор с истекшим сроком годности.