

SONY®

Бумага для медицинских регистрирующих приборов в рулонах, пачках, листах, печатных комплектах или отдельных упаковках

UPP-110HG

UPP-110HD

UPP-110S

Инструкции по использованию

© 2017 Sony Corporation Printed in Russia

Внимание!

Для безопасности и дополнительная информация по использованию данного изделия приводятся в инструкции по эксплуатации принтера.

Утилизацию необходимо осуществлять в соответствии с принятыми в медицинской практике методами, а также соответствующими местными, государственными и федеральными законодательными актами и инструкциями согласно анПин 2.1.1.7.2790-10 класса А.

Область применения/Назначение

Применяется только в условиях лечебных, лечебно-профилактических медицинских учреждений.

Бумага используется с принтерами UP-X898MD, P-D898MD, UP-D897, UP-897MD.

Комплектация

UPP-110HG включает в свой состав комплект из десяти рулонов термобумаги.

UPP-110HD включает в свой состав комплект из десяти рулонов термобумаги.

UPP-110S включает в свой состав комплект из десяти рулонов термобумаги.

Бумага для печати имеет следующие характеристики:

Характеристики отпечатка	Тип бумаги
TYPE I (обычная)	UPP-110S
TYPE II (высокой плотности)	UPP-110HD
TYPE V (глянцевая)	UPP-110HG

Характеристики

UPP-110HG
Размеры 110 мм x 18 м

UPP-110HD
Размеры 110 мм x 20 м

UPP-110S
Размеры 110 мм x 20 м

Класс потенциального риска 1

Примечания относительно хранения и обращения с бумагой



Не используйте повторно

Это может привести к нарушению нормальной работы и отрицательно повлиять на результаты печати.

Хранение неиспользованной бумаги

- храните неиспользованную бумагу при температуре не более 30°C в сухом месте, защищенном от прямого солнечного света.
- не храните неиспользованную бумагу вблизи летучих жидкостей и не допускайте контакта с органическими летучими жидкостями, целлофановой пленкой и соединениями винилхлорида.

Загрузка бумаги


- При загрузке обращайтесь с бумагой осторожно во избежание касания стороны печати пальцами. Медицинский контактный гель, отпечатки пальцев и пот могут привести к потере четкости изображения.
- После удаления наклейки с ведущей кромки бумаги вытяните бумагу на 15–20 см перед печатью. Оставшийся на бумаге клей с наклейкой может испортить отпечаток.
- При повторном использовании уже извлеченной бумаги вытяните ее на 15–20 см перед печатью. Пыль и другие загрязнения могут испортить отпечаток.

Хранение отпечатков

- Во избежание выцветания и изменения цвета отпечатков храните их в сухом прохладном месте при температуре не более 30°C.
- храните отпечатки в полипропиленовом пакете или между листами бумаги, не содержащими пластика.
- не храните отпечатки в местах, подверженных воздействию прямого солнечного света и повышенной влажности.
- не храните отпечатки вблизи летучих жидкостей и не допускайте контакта с органическими летучими жидкостями, целлофановой пленкой и соединениями винилхлорида.
- Во избежание выцветания не складывайте отпечатки на или под диазотипную бумагу.
- Для крепления отпечатков на другом листе бумаги используйте двустороннюю клейкую ленту или клей на водной основе.
- Не сжигайте использованную бумагу из принтера.

Примечание

Избегайте контакта бумаги со стороны, предназначенной для печати, с другими предметами. Это может привести к загрязнению бумаги и созданию отпечатков ненадлежащего качества.

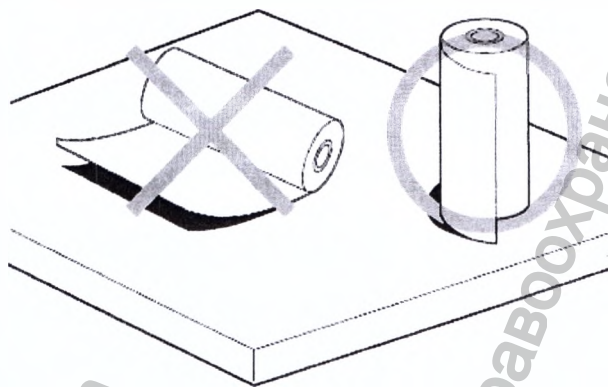

Условия эксплуатации и транспортировки

Температура: от 5°C до 30°C
Относительная влажность воздуха: от 30% до 80% (без конденсации)

Техническое обслуживание и ремонт

Медицинское изделие не подлежит техническому обслуживанию и ремонту.

Гарантии производителя

Производитель не несет ответственности за повреждения или несчастные случаи в результате неправильного использования, ошибки пользователя или внешних чрезвычайных ситуаций. По вопросам качества продукции обращайтесь к уполномоченному представителю производителя.

Срок годности

2 года от даты производства указанной на упаковке.
Рекомендуется хранить в холодном 5°C и темном месте.

Дата изготовления указана на упаковке изделия в следующем формате: MMM' YY, где MMM – месяц и YY – год изготовления.

Производитель

Сони Корпорейшн 1-7-1, Конан, Минато-ку, Токио, 108-0075, Япония
Sony Corporation 1-7-1, Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-0075, Japan

Завод-изготовитель

«Sony Storage Media Manufacturing Corporation Tagajo Site» 3-4-1 Sakuragi, Tagajo-shi, Miyagi 985-0842, Japan
Сделано в Японии

Уполномоченный представитель производителя

Акционерное общество «Сони Электроникс»
Россия, 123 103, Москва, Карамышевский проезд, д. 6